

## Siège de bain pivotant

Référence : 18 20 431 000



### Fonctionnement :

Le siège de bain pivotant à 360 ° facilite l'accès à la baignoire, il permet à l'utilisateur de s'asseoir à l'extérieur de la baignoire et de pivoter pour rentrer dans celle-ci.

Une manette de verrouillage permet de verrouiller la rotation dans la position souhaitée afin de sécuriser le siège.

Le siège se pose directement sur les rebords de la baignoire et il est maintenu grâce à 2 stabilisateurs latéraux.

**Utilisation prévue :** ce siège est destiné à être utilisé comme aide au bain, pour faciliter l'accès à la baignoire des personnes à mobilité réduite.

### Caractéristiques :

#### • Matériaux

Siège : Polypropylène (PP)

Châssis : acier inoxydable, traitement époxy

#### • Dimensions

Profondeur d'assise : 38 cm

Largeur d'assise : 40 cm

Hauteur du dossier : 47 cm

Largeur entre les accoudoirs fixes : 51 cm

Longueur hors tout : 73 cm

Poids net : 5.5 kg



Charge maximale supportée : **120 kg**

**Ne pas dépasser la limite de poids supportée**, cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

### AVERTISSEMENT DE SECURITE


- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il est correctement monté.
- Si vous détectez des anomalies n'utilisez pas votre produit car cela pourrait compromettre votre sécurité, contactez le point de vente.
- Avant utilisation, vérifier que le siège est solidement fixé, que les 4 embouts antidérapants sont en bon état et que le siège de bain soit bien en appui sur les rebords de la baignoire.
- Vérifier que les vis de réglage et le levier rotatif sont en bon état de fonctionnement.
- Toujours verrouiller la rotation du siège avant de s'asseoir ou de se relever.
- Lors de la manipulation, faire attention de ne pas mettre les doigts au niveau de la zone de rotation du siège.
- Avant de s'asseoir, l'assise doit être sèche pour éviter tout risque de glissement.
- Il y a un risque de dérapage en s'asseyant ou en se relevant dans une baignoire humide, en cas d'utilisation de savon.
- Avant de se relever du siège, s'assurer de poser ses pieds sur une surface sèche afin de prévenir le risque de chute.
- Ne pas se tenir debout sur le siège, ni se balancer dessus, au risque de chuter.

### ASSEMBLAGE

L'assemblage ne nécessite pas d'outils.

- 1) Retourner le siège sur une table ou sur le sol, positionner le support du siège parallèlement à la platine.
  - 2) Insérer le siège sur l'axe de la platine et visser la vis latérale à molette grise pour fixer l'ensemble.
  - 3) Installer le siège de bain sur la baignoire, vérifier que les quatre patins du siège de bain reposent d'au moins 5 cm sur le rebord de la baignoire.
  - 4) Régler à la main les tiges filetée avec vis papillon servant de stabilisation latérale, jusqu'à ce que leurs embouts plastique soient en contact avec les parois intérieures de la baignoire.
  - 4) Le siège est pivotant à 360°, pour effectuer la rotation lever le levier latéral pour déverrouiller le siège et le faire pivoter dans la position voulue. Vérifier que le mécanisme de rotation s'enclenche bien dans les quatre positions, sans à-coups et qu'il se verrouille quand il est en place. Lorsque le levier est abaissé, le mécanisme rotatif se verrouille.
- Ne pas trop serrer les vis de réglage.

# NOTICE D'UTILISATION

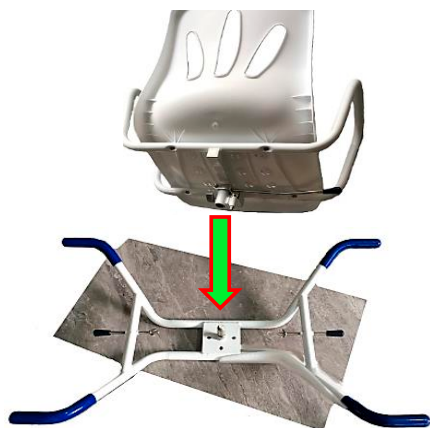

- Vérifiez la bonne stabilité du siège de bain avant son utilisation.

## ENTRETIEN

- Il est recommandé de vous assurer régulièrement du bon état du siège de bain, ainsi que de l'usure de chaque composant.
- Vérifier régulièrement l'efficacité du levier de blocage et l'état des embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier la solidité du siège, qui ne doit pas être détérioré, ni présenter de fissure.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Nettoyer le produit à la main, avec un nettoyant non abrasif et non corrosif (alcalins, acides, etc.) ne jamais utiliser de solvant (diluants cellulose, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique.
- Utiliser un détergent doux avec un chiffon doux. Si nécessaire, utiliser un désinfectant de surface doux, ou de l'alcool à 70°.
- Température maximale de nettoyage 60 °C. Au-delà de cette température le plastique pourrait être endommagé.
- Un nettoyage régulier réduira l'accumulation de calcaire sur votre produit.
- Après utilisation, stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière, ne pas entreposer le produit à proximité d'une source de chaleur.

Garantie 2 ans

### **Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages liés à :**

un non respect du manuel d'utilisation, un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur, une utilisation inadéquate de ce produit, des modifications techniques non autorisées et l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

Fabriqué par :

FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD

Plant 2, Plant 3, 65 Building, No. 88, Haitian road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, China



Lire la notice  
avant utilisation



Ne pas utiliser  
si l'emballage  
est endommagé



Dispositif Médical



Marquage CE



Respecter  
les consignes  
de tri

joleti

V122024